



基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒(CHIKV) (荧光PCR法)


根据基孔肯雅病毒的基因序列特点，在序列保守区设计特异的引物和探针，采用RT-PCR技术，对病原体核酸（RNA）进行检测。

适用于全血、血清、病毒培养物、脑脊液、蚊虫匀浆液、组织培养物等样本检测。

产品特点

-  **简便：**即用型全预混反应体系，无需额外配制，减少手工操作
-  **快速：**上机检测时间<65min得到结果
-  **质控全：**含阴阳对照及内源性内参，全程监控实验，结果更可靠
-  **适配广：**可用于常见荧光PCR仪，如上海宏石SLAN-96S/96P、ABI7500等
-  **效率高：**单管检测，一批次可检测94份样本
-  **特异性：**与感染症状相似的其他病原体 and 人的总核酸均无交叉反应
-  **重复性：**批内CV值≤2%，批间CV值≤3%
-  **灵敏度：**500 copies/mL

推荐配套核酸提取试剂

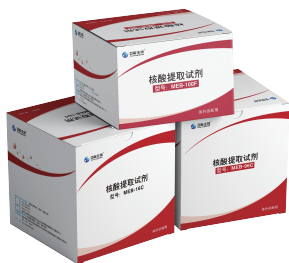

核酸提取试剂MEB
(粤深械备20200318号)

操作流程



全自动核酸提取仪
YN-AP4810/AP96*

核酸提取


*提取试剂亦可适配其他设备



全自动医用PCR分析系统
SLAN-96P/96S**

RT-PCR检测+结果分析

**检测试剂亦可适配其他荧光PCR仪

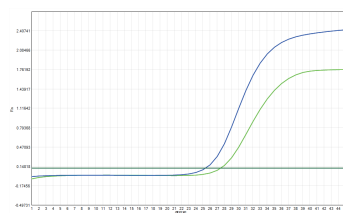

阳性结果示例

蚊媒病原体检测产品

货号	产品名称	核酸	规格	有效期
YN-OP-022	基孔肯雅病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	RNA	24、48T/盒	12个月
YN-OP-001	登革病毒通用型核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	RNA	24、48T/盒	12个月
YN-OP-011	登革病毒（I/II/III/IV型）四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	RNA	24、48T/盒	12个月
YN-OP-028	寨卡病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）	RNA	24、48T/盒	12个月

亞能生物技术有限公司(深圳)有限公司
Yaneng BIOScience (Shenzhen) Co., Ltd.

营销中心: 深圳市宝安区留仙一路高新奇产业园2期1栋9层
生产中心: 深圳市坪山区金辉路14号生物医药创新产业园区

电话: 0755-26031001
传真: 0755-23085300
网址: www.yanengbio.com

客服热线: 400-611-2237
商务热线: 0755-26031053



YN-SC-CHKV-202508